



体重設定から体位変換、姿勢保持を 全自動で行う床ずれ防止エアマットレス

難しい設定は不要！電源コード差し込むだけ！

マットレス内部の空気の流れを解析し、
体重や体型に合わせたかたさを自動で設定します。



特徴！

- 全自動で設定や操作不要！
- トップクッション(※1)入りで快適寝心地
- グライドシートでズレカを最小限に！(※2)
- 寝位置センサーで端座位を安定サポート
- 停電時もエア保持

■ベッド本体に直接接続でき電源コード不要
注：パラマウントベッド楽匠Z、楽匠プラスシリーズのみ対応

(※1)エアセルとカバーの間にウレタンクッションが挟まれており、寝心地が抜群にアップ(※2)背中部と踵部に採用

■通気タイプ

厚み：17cm

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	KE-911T	00170-001355
83cm幅	KE-913T	00170-001357
91cm幅mini	KE-912T	00170-001356
83cm幅mini	KE-914T	00170-001358

■清拭タイプ

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	KE-911S	00170-001351
83cm幅	KE-913S	00170-001353
91cm幅mini	KE-912S	00170-001352
83cm幅mini	KE-914S	00170-001354

床ずれ予防具	こちあ利楽flow
月額レンタル料金	8,000 円


新製品のため価格公表データありません。

全自動運転 (i-fitting) って一体なに？

安静

スモールフロー機能 (自動体位変換機能)

ご利用者様を寝かせると、
4つの湾曲形状のエアセル
「スモールフローセル」が
15分間に1つずつ、時計回
りに膨張と収縮を繰り返
し、自動で小さな体位変換
をおこないます。

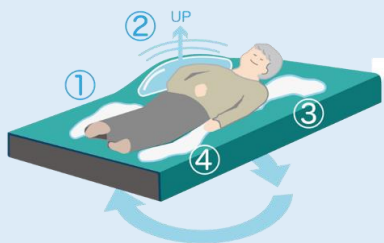


状況に応じた設定変更ができ安心・安全！
動かしたくないセルのみ動きを中止できます。

背上げ

バックサポート機能

ベッドの背角度が約30度以
上になると、4つのスモー
ルフローセルが同時に膨ら
み、背上げたときの姿勢
保持をサポートします。

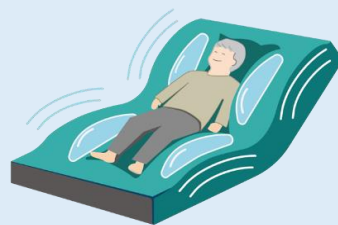

胸部に配置されたセルが胸郭を両側から支えて、
背上げ時の上半身のふらつきを抑えます！

端座位/離床

自動しっかり機能

ご利用者様の起き上がりや
マットレス端部への寝返
り、端座位を検知し、マッ
トレス全体の内圧を自動で
上げてかたくします。膨ら
んでいたスモールフローセ
ルは自動で縮みます。



ご利用者様が端座位をとれるかたさへ：約1分
介助者が乗っても大丈夫なかたさへ：約2分
待ち時間を短縮し有効的に時間を使えます！

自動検知技術

i-fitting (かたさ自動運転機能)

体重連動自動調圧

20kg～180kgまでの範囲で自動判定

体系連動自動調圧

姿勢の変化を判断して
内圧をコントロール

背角度連動自動調圧

変化していく背上げ角度に
リアルタイムで対応



i-fittingの体重・体系計測の仕組みは、
ご利用者様を寝かせたときにエアセルから
押し出される空気の量と勢いから、
体重、姿勢、体型を推測しています！

マイクロクライメイト対応のファンモーター付 次世代のエアマットレスが誕生



こもった熱と湿気を吸い込み、マットレス外部に排気

マットレス内部の空気の流れを解析し、
体重や体型に合わせたかたさを自動で設定します。

ベッド幅	型式	TAISコード
100cm幅(*1)	CR-761	00206-000144
91cm幅	CR-753	00206-000141
83cm幅	CR-750	00206-000140
91cm幅mini	CR-757	00206-000143
83cm幅mini	CR-755	00206-000142

床ずれ予防具

ビックセルアイズ

月額レンタル料金

10,000

円

(*1)100cm幅は月額レンタル料 11,000円

新製品のため価格公表データありません。

マイクロクライメイトって？

従来の床ずれ発生の外的要因である、「圧迫」「ずれ」「摩擦」の3大要素に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心が高まっているのがマイクロクライメイト（皮膚局所の温度・湿度）という新しい概念です。



マイクロクライメイト対応システム

マイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマット内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。身体を直接冷やさず接触面の温度と湿度の上昇を抑えます。



操作設定と動作状況をリアルタイムでディスプレイ



背上げ角度と経過時間をデジタル表示
15°から5°刻みで液晶画面に表示。ケアの時間管理にも使えます。

背上げ時もクイックハードモード有効
残り時間を液晶画面に表示。
解除3分前に音声でお知らせします。

■ 背上げ角度を自動計測

■ 定期的な圧切替で床ずれ防止

局所の圧迫とズレカの開放を定期的に行います。

■ リハビリ環境にも配慮

背上げ時にクイックハードモードを「ON」状態のまま継続して使用できます。

■ 停電時、最低でも14日間

マットレス内のエア保持
電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

3段階の圧切替「通常」「弱」「静止」の3つの圧切替によりきめ細やかな対応が可能。



最新型の3層式エアセル

身体をしっかり支えて仙骨部や踵部などの骨突出部位をピンポイントで優しく包み込み、背上げ時のズレや摩擦も吸収！
拘縮のきつい方におススメ！



介護用品・福祉用具・最大級の展示場

すまいるズ

〒598-0001 大阪府泉佐野市上瓦屋635-3

泉佐野店 ☎ 0120-086-294

〒590-0432 泉南郡熊取町小垣内2-1989-3

熊取店 ☎ 0120-054-294