

令和2年10月1日 福祉用具の日に、レンタル開始！！



Emi / 3つのコンセプト

快適 安全 簡単

Emi Webページ



2モーター+ヘッドレスト

頭部 (ヘッドレスト) モーター駆動 0~30°/50°
 背・脚連動 モーター駆動 (背)0~70°・(脚)0~30°
 ハイロー モーター駆動 (床高)25~67.5/20~62.5cm

品番	タイプ	床幅	床長	全幅	全長	質量	TAISコード
WR2-90H16 樹脂ボード/トール 【木目ダーク】	ショート	90cm	181cm	99cm (サイドレールホルダー使用時)	192cm	約92.1kg	00167-000332 樹脂ボード/トール 【木目ダーク】
	レギュラー		191cm	91.5cm (サイドレールホルダー収納時)	203cm		

2モーター+ヘッドレスト	
月額レンタル料金	ご利用者様負担額
7,000円	1割 700円
	2割 1400円
	3割 2100円

3モーター+ヘッドレスト

頭部 (ヘッドレスト) モーター駆動 0~30°/50°
 背上げ モーター駆動 0~70°
 膝上げ モーター駆動 0~45°
 ハイロー モーター駆動 (床高)25~67.5/20~62.5cm

品番	タイプ	床幅	床長	全幅	全長	質量	TAISコード
WR3-90H16 樹脂ボード/トール 【木目ダーク】	ショート	90cm	181cm	99cm (サイドレールホルダー使用時)	192cm	約92.8kg	00167-000316 樹脂ボード/トール 【木目ダーク】
	レギュラー		191cm	91.5cm (サイドレールホルダー収納時)	203cm		

3モーター+ヘッドレスト	
月額レンタル料金	ご利用者様負担額
9,000円	1割 900円
	2割 1800円
	3割 2700円

※1 背・脚連動機能は、切替により背上げ単独動作に変更が可能です。

ベッド付属品

ベッドサイドレール



K-170R (2本1組)

月額レンタル料金

500円

ご利用者様負担額

1割 50円
2割 100円
3割 150円

TAIS 00167-000111
長さ99.5cm
高さ(ボトム面より)39.5cm

回転式アーム介助バー



K-47R (1本)

月額レンタル料金

2,000円

ご利用者様負担額

1割 200円
2割 400円
3割 600円

TAIS 00167-000226
長さ119cm
高さ(ボトム面より)39.5cm
アーム部の角度は15°刻み

サポートグリップ



K-95 (1本)

月額レンタル料金

800円

ご利用者様負担額

1割 80円
2割 160円
3割 240円

TAIS 00167-000281
長さ85.5cm
高さ(ボトム面より)39.5cm
パイプ系φ2.5cm

マットレス



MB-2500Lレギュラー

月額レンタル料金

2,000円

ご利用者様負担額

1割 200円
2割 400円
3割 600円

TAIS 00167-000184
長さ191cm、幅90cm、厚み8cm
カバー・クッション材：ポリエステル
MB-2500L ショート：長さ181cm

ベッドサイドテーブル



ダーク

PT-7000F [D]

月額レンタル料金

2,500円

ご利用者様負担額

1割 250円
2割 500円
3割 750円

TAIS 00167-000351
幅90cm、奥行44.2cm
高さ66~97.5cm
キャスター4輪ロック



使用イメージ

※サイドレールの差し込み方向など詳細は取り扱い説明書をご確認ください。

電動ヘッドレスト機能

Emi(エミ)は、頭頸部を前屈させることにより嚥下や呼吸機能への好影響が期待できるADLポジション、安楽姿勢を追求したQOLポジションなど、かつてない多彩なポジショニングが可能。ベッド操作のロック機能など、安全性にも優れた設計です。

ADL ポジション | 誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という顎を引いた前向き目線の姿勢になり、誤嚥リスクを低減します。

ベッド上での食事や投薬時に、また口腔ケア時のポジショニングにご使用ください。



QOL ポジション | 安楽姿勢に

上体が起きるので、ご家族と目線が合いやすくコミュニケーションをとる場合に最適。

またベッド上でTVを見たり、本を読んだりする場合にも活用でき、快適にお過ごしいただけます。



スイングバック機能

驚きのズレない背上げ

背上げ時に背ボトムの支点が8cm後ろにスライドする「スイングバック機能」により、腹部の圧迫と前ずれを軽減します。

骨盤が立った状態で、お腹の圧迫感が無くズレのない背上げに。床ずれリスク軽減となります。



業界最高*の脚上げ

在宅医療への活用

血圧が急に下がった場合のショック体位や、脚をギプスで固定している場合に足先が腫れるのを防ぐために高い脚上げが有効です。

床ずれリスク軽減

脚上げが高いため、背上げ時の前ずれ防止につながります。

現場でこんなことはありませんか?

むくみを解消するために脚上げをする際、在宅ベッドの脚上げ高が低いため、脚先にクッションなどを置いて脚の高さを上げている。

Emiならクッションを使わなくても高い脚上げを実現! 脚先は下がらず、完全に水平になるためむくみ解消効果がより期待できます。

※2020年9月時点

3モーター+ヘッドレスト

2モーター+ヘッドレスト

脚上げ 45°

脚上げ 30°



業界最大級の脚上げ高(3モーター)

お問い合わせ先



介護用品・福祉用具・最大級の展示場

すまいるス

〒598-0001 大阪府泉佐野市上瓦屋635-3

泉佐野店 ☎ 0120-086-294

〒590-0432 泉南郡熊取町小垣内2-1989-3

熊取店 ☎ 0120-054-294